

## SMP AT - Digitális alkohol teszter

Működése:

Bekapcsolási idő 10 mp, ilyenkor a készülék el kezd visszaszámolni, 10 másodperctől 0-ig. Ilyenkor alkalmazkodik a külső hőmérsékletéhez. Miután ez megtörtént, csippanással jelzi, ismételtén elkezd 10 másodpercről visszaszámolni. Ekkor kell egy nagy levegővel megfújni a szondát, egyenletesen, nem túl erősen, amíg a készülék nem csipog. A csipogás után a mért értékek megjelennek a kijelzőn.

Megjeleníti a "CAUTION" feliratot, ha az eredmény 0,02% - 0,05% -on belül található.

Megjeleníti a "DANGER" feliratot, amikor eredménye eléri vagy meghaladja a 0,05% -ot.

Mérési tartomány 0,00% - 0,15% vagy 0,0 - 1.9 g l

Megjeleníti az "OFF" feliratot 10 másodperce a mérés befejezése után, majd automatikusan kikapcsol körülbelül 3 másodperc múlva.

Mérési visszaszámlálás 10 mp

2 x AAA elemmel működik.

Méreték 11 cm x 7 cm x 2,5 cm.

Fontos: A mérés megkezdése előtt legalább 20 perccel, ne dohányozzon, ne egyen, illetve ne fogyasszon alkoholt.

Technikai információk:

- Digitális alkoholszonda hangriasztással
- Érzékelési határok: 0.00-0.19% BAC / 0.00-1.9 g/l
- Gyors reagálás, és újrahasználhatóság
- Automata kikapcsolási funkció
- 5 db csere fújó cső
- Kulcstartó
- Működés: 2db AAA elemmel (az elem nem tartozéka a készüléknek)

Referencia:

BAC: Vér-Alkohol koncentráció ( Blood Alcohol Concentration )

0.05% BAC: Megfelel 0.05g alkoholnak 100ml vér egységenként

**Figyelmeztetés: A termék nem hitelesített eszköz, ezért a mért értékek csak tájékoztató jellegűek!!**

**Importőr;**

**S.M.Power Kft**

**2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**

**[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)**